

## Pentru ce produs este acest manual de utilizare?

Șosetă inteligentă Smart Sock 3

Șosetă inteligentă Smart Sock Plus

## Ce găsiți în pachet

Șosete mărimile 1, 2 și 3, pentru fiecare mărime o șosetă pentru piciorușul drept și stâng\*

- Senzorul șosetei inteligente Smart Sock
- Baza
- Cablul bazei
- Adaptor de alimentare
- Ghid introductiv

\*Șosetele de mărimea 3 sunt incluse doar în pachetul șosetei inteligente Smart Sock Plus.

## Cum funcționează șoseta inteligentă Smart Sock le la Owlet?



Senzorul șosetei inteligente Smart Sock utilizează pulsoximetria pentru a colecta date de la piciorușul bebelușului în timp ce acesta doarme. Lumina șosetei trece prin piele, iar fluxul sanguin și nivelul de oxigen sunt estimate pe baza cantității de lumină pe care o captează senzorul.


Senzorul șosetei inteligente Smart Sock colectează datele și le trimite la bază. Pe baza acestor date, baza vă va alerta, în caz de nevoie. Baza este concepută să vă avertizeze la timp în cazul unei alarme roșii, așa că vă recomandăm să o amplasați astfel încât să o puteți auzi în permanență.

## Cum funcționează aplicația

**În cazul în care șoseta inteligentă Smart Sock este conectată la rețeaua Wi-Fi:** Baza trimite informații către cloudul Owlet prin intermediul rețelei Wi-Fi. Cloud Owlet permite vizualizarea acestor date în aplicația Owlet. Astfel, puteți vizualiza toate datele în timp real și puteți primi notificări din aplicație oriunde v-ați afla.

### **Modul LAN (rețea locală):**

Dacă doriți să utilizați modul LAN, telefonul trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și baza. Aplicația va utiliza rețeaua Wi-Fi pentru a stabili o conexiune inițială cu cloudul Owlet și pentru a primi date până când închideți aplicația și până când se schimbă rețeaua Wi-Fi sau baza aplicației.

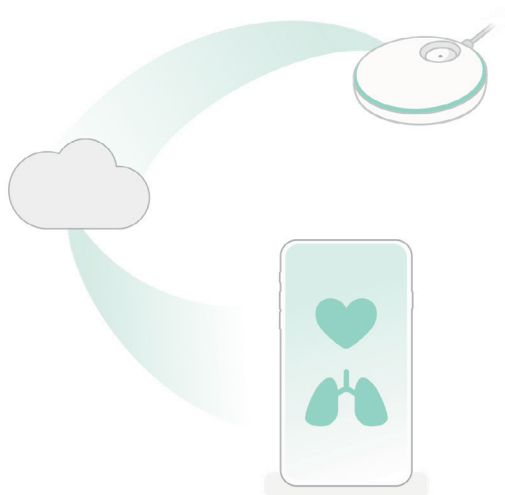

# Cum se configurează și se utilizează șoseta inteligentă Smart Sock de la Owlet.

## Cerințe

Șoseta inteligentă Smart Sock de la Owlet necesită acces la un dispozitiv iOS sau Android pe care este instalată aplicația Owlet Care. Informații privind versiunile minime ale sistemului de operare le găsiți magazinul de aplicații.

Șoseta inteligentă Smart Sock Plus este potrivită pentru copii cu greutate maximă de 24,9 kg (55 lbs).

Citirile valorilor în timp real, accesul de la distanță la aplicație și unele funcții ale aplicației necesită conexiune la o rețea wireless de 2,4 GHz. Rețelele Hotspot Wi-Fi și rețelele de 5GHz nu sunt suportate.

## Pentru a configura șoseta inteligentă Smart Sock de la Owlet:

- 1 Descărcați aplicația Owlet

Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele iOS și Android.



Hi there! Let's make you an account.

Email

Password (+6 characters long)

Re-enter Password

- 2 Creați un cont

Pentru a crea un cont, urmați instrucțiunile din aplicație.



'Hoo' are you?

First Name

---

Last Name

---

Phone

---

Your Birthday

---

Zip

---



An email with a confirmation code has just been sent to you.

Resend email



Your account has been confirmed. Welcome to the Owlet family!

To home >

Add a child profile or device

Get started



Learn more about the Owlet Smart Sock >



Do you have an Owlet device to set up?

No >

Yes >

Which device would you like to set up?



Smart Sock 3



Smart Sock 2




Cam




### ③ Configurarea dispozitivului

NOTĂ: Dacă aveți deja un cont Owlet și adăugați un alt dispozitiv Owlet, urmați instrucțiunile aplicației pentru a adăuga un nou dispozitiv.

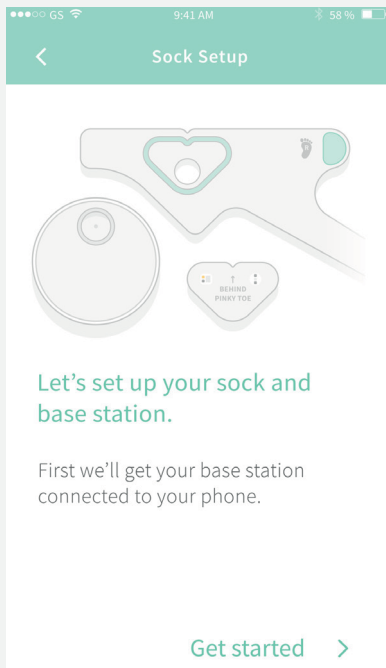


④ Conectați baza la sursa de alimentare și șoseta inteligentă Smart Sock la bază.

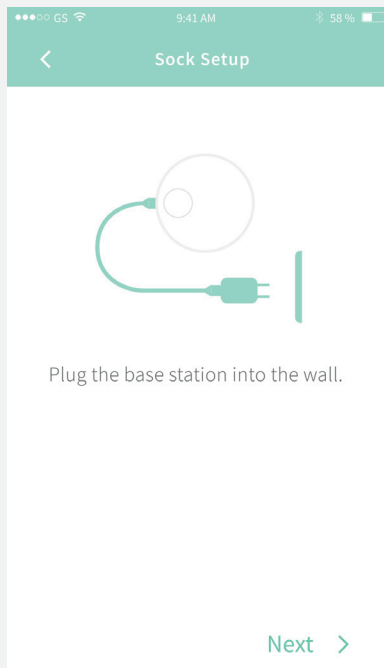


Haiдеți să conectăm baza dvs. la rețeaua Wi-Fi pentru a putea vizualiza datele pe telefon.

1. Treceți la setările rețelei Wi-Fi ale telefonului dvs. și selectați rețeaua „Owlet”.

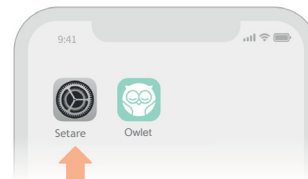

2. Reveniți la aplicația Owlet.

*Dacă sunteți redirecționat sau primiți un mesaj „Redirecționare eșuată”, este în regulă! Trebuie doar să reveniți la aplicația Owlet.*

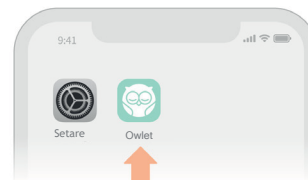

(Acest ecran este valabil numai pentru dispozitivele iOS.)



Your account has been confirmed. Welcome to the Owlet family!

[To home >](#)

(Acest ecran este valabil numai pentru Android.)

## Wi-Fi Setup

Select the Owlet device you want to set up.

 Owlet - 383G9f65

(Acest ecran este valabil numai pentru Android.)

## Wifi Setup

Select Wi-Fi router

(Does not work with 5.0GHz networks yet.)

 JohnsonFamilyWifi

 Your Neighbors Weird Wifi Name

 Jurassic House

 The Petersons

Potrivit instrucțiunilor aplicației puteți conecta șoseta inteligentă Smart Sock la rețeaua Wi-Fi, puteți înregistra și împerechea șoseta și dacă e nevoie, puteți actualiza șoseta la cea mai recentă versiune.

9:41 AM 58%

## Wifi Setup


Enter the Wi-Fi Password for JohnsonFamilyWifi

Password \_\_\_\_\_

Connect

9:41 AM 58%


## Wifi Setup



One sec,  
connecting to Wi-Fi...

9:41 AM 58%

## Wifi Setup



Looks like the Wi-Fi is  
connected and ready to go!

Next, we'll get your device registered.

Next >



### Wifi Setup

#### Quick check

Check the status of the Wi-Fi on the back of the base station.

- The Wi-Fi light is off >
- The Wi-Fi light is on >

### Register Base Station




Click and hold down on the base station (until you hear 2 beeps)

It can take up to 10 seconds to register after pushing the button.




### Sock Pairing

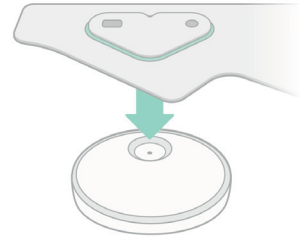

Registration successful!

Insert the sock into the base station

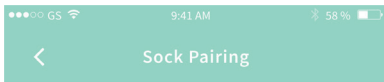

## The sock has successfully paired!

Your base station should now be pulsing white, indicating that your sock is charging.

Next we'll make sure your device is up to date.




## Updating your Owlet Sock 3

Please don't unplug your base station while it's updating.



Finishing up...

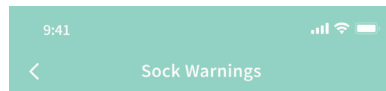

## Important Safety Information

### Correct sock fit

Your baby's safety is our top priority and we know it's yours too.

We want you to be aware that incorrect use of the sock could result in discomfort, potentially leading to red marks, pressure sores, or blisters on your baby's foot. Keep your baby's foot dry, and use the correct sock size and follow our placement guidelines.




### Sock Hygiene

Gently hand wash the sock and sensor at least once every week with a mild detergent. Wait until the sock is completely dry before continuing use.

### Safe sleep practices

Remember to always practice safe sleep practices and avoid unsafe sleep surfaces including swings, car seats and co-sleeping.

The Owlet Sock is not a replacement for safe sleep and parental care. Please ensure you are following safe sleep guidelines and are using the Owlet Sock as an aid to know how your baby is doing in addition to all the care, safety and love they receive from you.

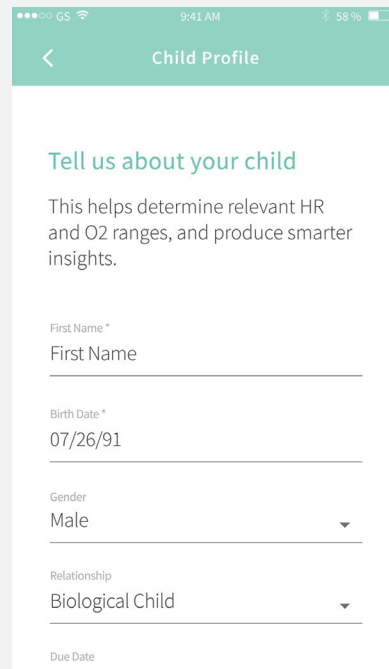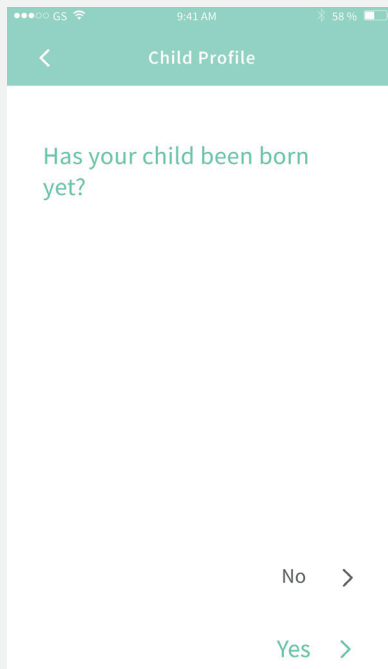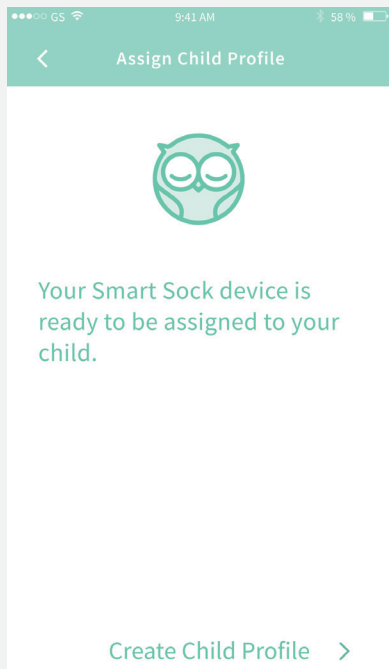

⑤ Creați un profil al bebelușului dumneavoastră. Aplicația vă ajută să creați un profil al bebelușului dumneavoastră și să-l asociați unui dispozitiv Owlet.

< Child Profile



Add a picture of Aaron

Or, do it later from the home screen if you'd rather.


## Mărimea corectă a șosetei inteligente Smart Sock și punerea corectă

Șoseta inteligentă Smart Sock este disponibilă în trei mărimi și există o șosetă atât pentru piciorușul drept, cât și pentru cel stâng pentru fiecare mărime:

Mărimea 1 este potrivită pentru bebelușii cu greutatea de până la 5,4 kg (12 lbs).

Mărimea 2 este potrivită pentru bebelușii cu greutatea cuprinsă între 5,4-13,5 kg (12-30 lbs).

Mărimea 3 este potrivită pentru copii cu greutatea cuprinsă între 13,5-24,9 kg (30-55 lbs).\*

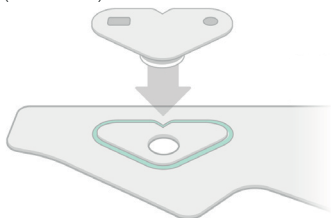

*\*Șosetele de mărimea 3 sunt incluse doar în pachetul șosetei inteligente Smart Sock Plus.*



### Prindeți senzorul de șoseta din material textil

Aliniați conturul senzorului cu linia de pe țesătura, apăsați senzorul pe șosetă pentru a-l prinde și fixați-l în poziție.

### SUGESTIE:

Dacă nu sunteți sigur de cea mai bună mărime, începeți cu o șosetă mai mică.



### Fixarea șosetei

Puneți șoseta pe partea laterală a piciorului, astfel încât senzorul să se afle după degetul mic.

Fixați banda sub degetele de la picioare, apoi înfășurați banda de gleznă în jurul părții din spate



a gleznei și fixați-o la nivelul părții superioare a piciorului. La poziționare corectă, banda de pe partea superioară a piciorului trebuie să fie îndreptată spre degetul mare, iar senzorul trebuie să se afle pe marginea degetului mic al piciorului bebelușului, astfel încât capul bufnitei să fie îndreptat spre degetele piciorului.



### **SUGESTII PENTRU UTILIZAREA ȘOSETEI INTELIGENTE SMART SOCK 3/SMART SOCK PLUS PE PICIORUȘELE BEBELUȘILOR ȘI A PREȘCOLARILOR:**

Bebelușii și copiii de vârstă preșcolară sunt mult mai mobili și mai activi decât sugarii, așa că am dori să vă împărtășim câteva sfaturi utile:

1. Puneți șoseta inteligentă Smart Sock doar după ce puneți bebelușul în pat, astfel încât acesta să se plimbe cât mai puțin cu ea. Mersul cu o șoseta pusă poate deteriora senzorul.
2. Așteptați până când copilul adoarme și și doar apoi porniți baza. Astfel preveniți alarmele galbene care v-ar avertiza în mod inutil că bebelușul se rostogolește până ce adoarme. Baza o puteți porni prin intermediul aplicației sau direct de pe unitate.
3. Dacă copilul dvs. nu a mai purtat niciodată o șosetă inteligentă Smart Sock, este posibil să ezite și să vă pună întrebări. Permiteți-i să vadă dispozitivul și să se obișnuiască cu el înainte de a-i pune șoseta.

## Colectarea de date și notificări

Înainte ca cel mic să meargă la culcare sau la somn, scoateți șoseta inteligentă Smart Sock de la bază și fixați-o pe el.

Luminile de la bază vor clipi în verde, indicând că dispozitivul încearcă să citească valorile. În momentul în care baza începe să obțină datele respective, va emite impulsuri verzi.

### Alarmă galbenă

În timpul alarme galbene, stația de bază va clipi în galben, va reda un cântec de leagăn, iar aplicația vă va trimite o notificare push. Culoarea galbenă indică faptul că șoseta este pusă incorrect sau a căzut de pe piciorușul copilului, iar dispozitivul nu a reușit să obțină date bune timp de cel puțin 60 de secunde.

### Alarmă albastră

În timpul alarme albastre, stația de bază va clipi în albastru, va reda un cântec de leagăn, iar aplicația vă va trimite o notificare push. Culoarea albastră indică faptul că șoseta se află în afara razei de acțiune a bazei timp de cel puțin 60 de secunde, avertizează că bateria este descărcată sau că semnalul este blocat.

Corpul uman poate perturba semnalul dintre bază și șosetă. Când țineți copilul în brațe, nu vă întoarceți cu spatele la bază pentru a evita alarmele false. Dacă alarma albastră se declanșează în mod repetat, apropiați șoseta și baza pentru a preveni notificările repetate.

#### SUGESTIE:

Dacă bebelușul are pusă șoseta în timpul hrănirii, aceasta poate declanșa o alarmă roșie, deoarece în mod natural, în timpul mesei conținutul de oxigen scade și ritmul cardiac crește.

### Alarmă roșie

Culoarea roșie indică notificarea cu cea mai mare prioritate. Baza are la dispoziție trei tipuri de notificări roșii la care clipește în roșu și emite un sunet ascuțit.

**Nivel scăzut de oxigen:** Vă va avertiza dacă nivelul de oxigen al copilului scade sub 80 %.

**Ritmul cardiac redus:** Vă va alerta dacă ritmul cardiac al copilului scade sub 60 de bătăi pe minut și dacă nivelul de oxigen scade sub 85 %.

**Ritmul cardiac ridicat:** Vă va alerta dacă ritmul cardiac al copilului depășește 220 de bătăi pe minut.

## **Întreruperea sunetului de notificare**

Puteți întrerupe sunetul oricărei alarme active timp de 60 de secunde prin apăsarea scurtă a butonului de pe bază sau prin intermediul aplicației.

Întreruperea va întrerupe sunetul bazei și al aplicației - inelul luminos de pe bază va continua să lumineze, iar detaliile vor fi disponibile în aplicație. Alarma va rămâne activă până când starea va fi rezolvată.

Dacă declanșatorul (oxigen scăzut, ritm cardiac scăzut sau ridicat) încetează în timpul întreruperii, alarma se va opri.

Dacă în timpul întreruperii se declanșează o nouă alarmă cu aceeași prioritate sau cu o prioritate mai mare, această alarmă va fi declanșată indiferent de întrerupere.

## **Baza**

Baza șosetei inteligente Smart Sock indică diferite stări de funcționare cu ajutorul următoarelor lumini color:

**Clipește treptat în verde:** Obținerea datelor

**Pulsează în verde:** Valorile sunt în limite normale.

**Clipește în albastru:** Șoseta inteligentă Smart Sock este în afara razei de acțiune a bazei, bateria este descărcată sau ceva blochează semnalul.

**Clipește în galben:** Șoseta inteligentă Smart Sock nu este pusă corect sau a căzut de pe picioruș.

**Clipește în roșu:** Ritmul cardiac sau nivelurile de oxigen sunt în afara intervalului specificat.

**Pulsează în alb:** Șoseta inteligentă Smart Sock se încarcă.

**Luminează în alb:** Șoseta inteligentă Smart Sock este complet încărcată.

**Treptat clipește în alb:** Șoseta inteligentă Smart Sock nu este conectată.

## **Cum pot activa monitorizarea și baza?**

Dacă senzorul se încarcă, scoateți-l din portul de încărcare sau apăsați baza pentru a-l elibera. Când apăsați pe bază, veți auzi un semnal sonor, iar baza se va aprinde în verde.

## **Cum pot opri baza și monitorizarea?**

Apăsați și mențineți apăsată baza până când lumina verde se stinge și se aude un semnal sonor.



## Încărcarea șosetei inteligente Smart Sock

Puneți șoseta inteligentă Smart Sock pe portul de încărcare situat în partea superioară a bazei și asigurați-vă că lumina bazei este albă.


### Nivelul de încărcare al șosetei inteligente Smart Sock

Nivelul de încărcare al șosetei inteligente Smart Sock poate fi verificat în aplicație.


Dacă lumina bazei pulsează în alb, șoseta se încarcă. Dacă luminează în alb, șoseta este complet încărcată.

### Avertizare la baterie slabă a șosetei inteligente Smart Sock

În cazul în care aplicația detectează că bateria șosetei inteligente Smart Sock se descarcă în mai puțin de o oră, vă va alerta cu o alarmă albastră. În acest caz însă, baza nu va emite niciun sunet și nu va clipi.

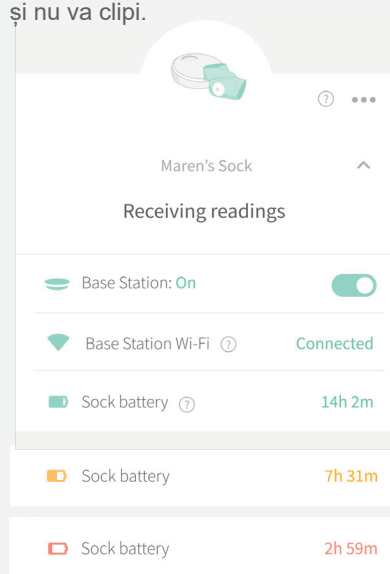

De asemenea, starea bateriei o puteți vizualiza în orice moment pe ecranul de stare al dispozitivului.



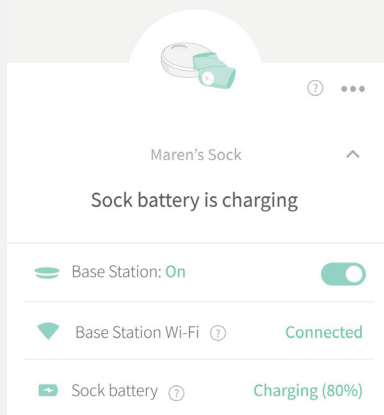


## Istoric

În fila Istoric din aplicație sunt afișate cele mai recente sesiuni de somn, date și alarme. Pentru vizualizarea Istoricului, baza și aplicația necesită conexiune la Wi-Fi.

Diagramele arată valorile medii ale ritmului cardiac, oxigenului și somnului din ultimele 10 minute și sunt actualizate la fiecare 10 minute în timpul fiecărei perioade de somn.

Prin tragerea diagramei în jos reînnoiți datele, sau închideți și redeschideți aplicația. Istoricul păstrează datele pentru ultimele 30 de sesiuni de somn.

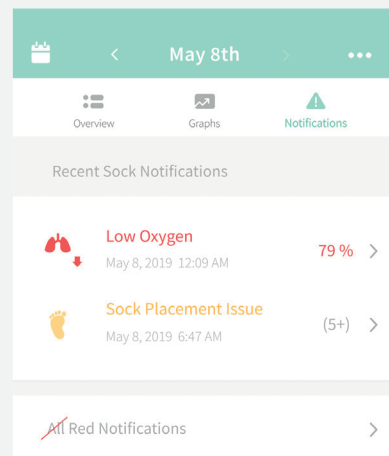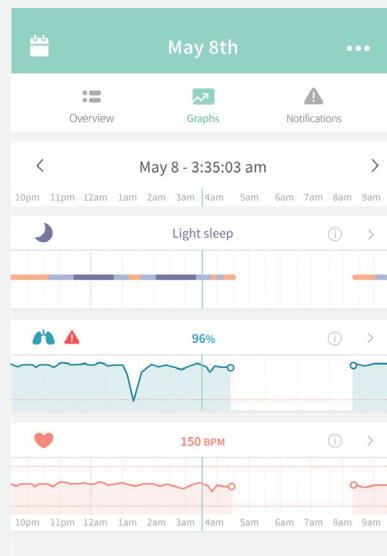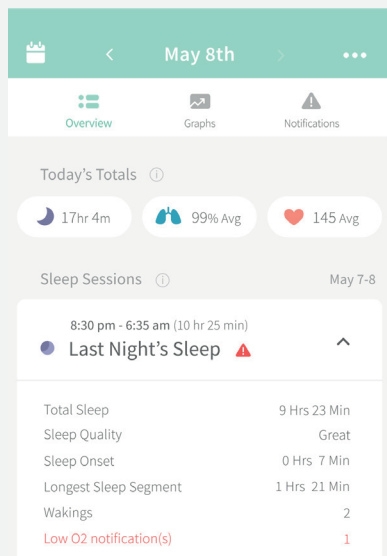

## După trezire

După ce ați dat jos șoseta inteligentă Smart Sock de pe copil, puneți-o înapoi în bază pentru a se putea încărca.

### **Îngrijirea și depozitarea șosetei inteligente Smart Sock**

Păstrați o a doua șosetă inteligentă Smart Sock în mărimea pe care o folosiți actual într-un loc ușor accesibil, astfel încât să puteți schimba în mod regulat șosetele la ambele picioare. Păstrați a doua mărime pentru utilizare ulterioară.

Compania Owlet recomandă spălarea șosetei și a sensorului cel puțin o dată la două săptămâni pentru a preveni iritarea pielii cauzată de o șosetă și un senzor murdare. Spălați șoseta și senzorul manual cu un detergent blând și apă rece. Lăsați să se usuce complet înainte de a le folosi din nou.

### **Cum să opresc senzorul șosetei inteligente Smart Sock**

Scoateți senzorul din bază. Deconectați cablul de alimentare de la bază. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pe bază în timp ce introduceți cablul de alimentare. Țineți apăsat butonul de pe bază până când lumina bazei devine portocalie și se aud patru semnale sonore. Apăsăți butonul. Lumina din șosetă se stinge. Pentru a porni din nou șoseta, introduceți senzorul în portul de încărcare al bazei.

# Sugestii și trucuri

## ***Punerea șosetei inteligente Smart Sock***

Șoseta pusă necorespunzător poate fi incomodă pentru copilul dvs. și poate provoca pete roșii, amprente sau bășici pe picioruș. Asigurați-vă că cel mic poartă o șosetă de mărimea potrivită: este important ca șoseta să se potrivească bine, dar să nu fie strânsă în jurul degetelor sau al gleznei. Recomandăm alternarea regulată a șosetei drepte cu cea stângă. Dacă apare înroșire pe pielea piciorușului, nu mai folosiți șoseta pe acel picioruș și folosiți-o pe celălalt picioruș până când înroșirea dispăre complet.

## ***Unde ar trebui să plasez baza?***

Baza trebuie să fie plasată în raza de acțiune a șosetei inteligente Smart Sock utilizată pentru a evita declanșarea inutilă a alarmei albastre. Raza de acțiune a Bluetooth este de până la 30 m. Baza este concepută să vă avertizeze la timp în cazul unei alarme roșii, așa că vă recomandăm să o amplasați astfel încât să o puteți auzi în permanență.

## ***Cum se testează alarmele***

### **Roșie**

Scoateți senzorul din bază și lăsați monitorizarea pornită. Apăsați și mențineți apăsată baza până când auziți trei semnale sonore, apoi eliberați-o. Dacă doriți să întrerupeți sunetul, apăsați din nou baza sau întrerupeți-l în aplicație. Dacă doriți să resetați dispozitivul, apăsați și mențineți apăsată baza până când lumina bazei se stinge și se aude un semnal sonor. Apoi apăsați din nou pe bază pentru a o porni.

### **Alarmă albastră**

Scoateți senzorul din bază și lăsați monitorizarea pornită. Țineți senzorul și îndepărtați-vă de la bază.

### **Alarmă galbenă**

Scoateți senzorul din bază și lăsați monitorizarea pornită. Puneți șoseta inteligentă Smart Sock pe piciorușul copilului sau pe degetul adultului până când dispozitivul obține date. Apoi scoateți șoseta și așteptați o clipă. Acest lucru poate dura până la 60 de secunde.


## ***Cum se întrerupe conexiunea la rețeaua Wi-Fi***

### **Prin intermediul bazei**

Scoateți senzorul din bază. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe bază în timp ce introduceți cablul de alimentare în bază. Țineți apăsat butonul de pe bază până când lumina bazei devine portocalie și se aud patru semnale sonore. Apoi apăsați de trei ori butonul de pe bază. Verificați dacă indicatorul Wi-Fi de pe partea inferioară a bazei este aprins.

## ***Aveți acasă un copil foarte energic?***

Încercăm să supraveghem copilul dvs. în orice situație, dar uneori acesta se mișcă atât de mult încât senzorul nu poate obține datele necesare. În acest caz, aplicația afișează picioarele oscilante. Mișcarea afectează calitatea datelor obținute, astfel, în loc să vă alerteze în mod inutil, detectarea și notificările sunt întrerupte pentru o perioadă de timp până când vor fi obținute valori de calitate.

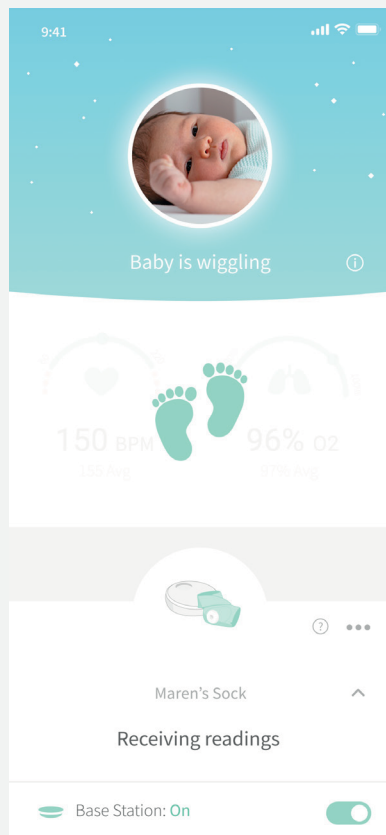


## ***Funcționează șoseta inteligentă Smart Sock și sub hainele copiilor?***

Șoseta inteligentă Smart Sock este concepută pentru a se potrivi perfect sub pijamale, învelitori și șosete, și să asigure bebelușului dumneavoastră un somn liniștit.

## ***Partajarea accesului la aplicație***

Compania Owlet lucrează la posibilitatea de a adăuga mai multe conturi pentru a partaja accesul la aplicație. Între timp, dacă doriți să partajați aplicația cu prietenii sau familia, trebuie doar să le furnizați detaliile de conectare la contul dvs.

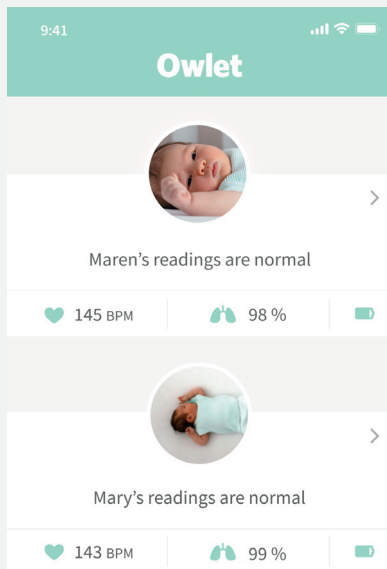

### **Mai mulți copii? Nicio problemă!**

Aplicația Owlet suportă crearea mai multor profiluri de copii și atribuirea oricărui dispozitiv fiecărui copil. Aveți grijă ca fiecare copil să aibă propria șosetă inteligentă Smart Sock și baza corespunzătoare, astfel încât, în caz de alarmă, să nu existe confuzii.

### **Luminozitatea bazei**

Baza este echipată cu un senzor de lumină ambientală și reglează automat luminozitatea luminii sale în funcție de lumina din cameră.

### **Centru de ajutor și suport**

În aplicație, accesați Cont > Ajutor și suport și contactați echipa noastră de service pentru clienți prin chat în aplicație, e-mail și telefon sau accesați site-ul [www.owletcare.ro](http://www.owletcare.ro). Alte sugestii și trucuri le găsiți în secțiunea Ghid din aplicație.

### **Depozitarea șosetei inteligente Smart Sock**

Senzorul șosetei inteligente Smart Sock conține o baterie care se va descărca după o perioadă mai îndelungată. În cazul în care bateria se descarcă complet, senzorul se va deteriora.

Depozitarea senzorului șosetei inteligente Smart Sock în 6 pași, ușor de urmat:

1. **Încărcați complet senzorul.**
2. **Scoateți senzorul din bază.**
3. **Oprii șoseta potrivit instrucțiunilor de la pagina 21.**
4. **Deconectați baza de la sursa de alimentare.**
5. **Depozitați senzorul, baza, cablurile, ștecherul și șosetele inteligente Smart Sock într-un loc răcoros și uscat.**
6. **Reîncărcați senzorul la fiecare 6 luni și apoi repetați pașii 1-5.**

## RO Avertizare / Instrucțiuni importante privind siguranța



### AVERTIZARE: Șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet nu este un dispozitiv medical.

Acesta nu este destinat să fie utilizat ca dispozitiv medical sau să înlocuiască un dispozitiv medical. Nu servește și nu este destinată diagnosticării, tratării, îngrijirii, atenuării sau prevenirii vreunei boli sau afecțiuni medicale, nici cercetării, înlocuirii sau modificării anatomiei sau a oricărui proces fiziologic.

Șoseta inteligentă Smart Sock 3 este concepută pentru copii sănătoși cu vârsta sub 18 luni, Smart Sock Plus este concepută pentru copiii sănătoși cu vârsta cuprinsă între 18 luni și 5 ani iar valorile limită de anunțare la șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet nu sunt la fel de stricte ca cele ale monitoarelor medicale.

*Țineți cont de faptul că: Acest produs are doar rolul de a vă ajuta să monitorizați starea copilului dvs și nu este menit să înlocuiască îngrijirea dvs. Sunteți responsabili pentru sănătatea și bunăstarea copilului dvs. și pentru respectarea principiilor privind somnul în siguranță, sănătatea și îngrijirea.*

- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet ca instrument de diagnosticare.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat utilizarea unui pulsometru de spital sau a unui monitor de stop respirator de spital.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet ca o scuză pentru obiceiuri de somn nesigure.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet ca alternativă sau ca înlocuitor al îngrijirii de către un adult.

### Garanție

Compania Owlet își susține cu mândrie produsele. Garanțiile noastre le găsiți pe site-ul web: [www.owletcare.ro](http://www.owletcare.ro).

### Termeni și condiții comerciale

Utilizarea produselor companiei Owlet este supusă termenilor și condițiilor care se găsesc pe site-ul: [www.owletcare.ro](http://www.owletcare.ro). Prin utilizarea produsului companiei Owlet, sunteți de acord cu acești termeni și

condiții.

Informațiile de contact pentru regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul web: [www.owletcare.ro](http://www.owletcare.ro).

### Siguranța

Siguranța dumneavoastră și a altor persoane este foarte importantă pentru noi. În acest manual și în aplicația Owlet Baby Care găsiți multe instrucțiuni importante privind siguranța. Citiți întotdeauna și respectați toate avertismentele de siguranță.



### PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A COPILULUI DVS:

ORI DE CÂTE ORI SUNĂ ALARMA, REACȚIONAȚI IMEDIAT.



AVERTIZARE: PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA BAZA LA O DISTANȚĂ DE CEL PUȚIN 1 METRU DE PĂTUȚUL COPILULUI, DEOARECE CABLUL POATE REPREZENTA UN PERICOL DE STRANGULARE.

ȘOSETA INTELIGENTĂ SMART SOCK DE LA OWLET ESTE DOAR UN ACCESORIU.

NU ÎNLOCUIEȘTE SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

ÎN CAZUL COPILOR NĂSCUȚI PREMATUR, AL COPILOR CARE UTILIZEAZĂ OXIGEN SAU AL COPILOR CU DIZABILITĂȚI, CONSULTAȚI MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ȘOSETEI INTELIGENTE SMART SOCK DE LA OWLET.



Modificările sau adaptările aduse acestui echipament care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru respectarea conformității pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a folosi acest echipament. Utilizați NUMAI adaptorul de alimentare furnizat. În cazul contrar se poate ajunge la anularea garanției noastre limitate. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute

astfel încât să asigure o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare într-o clădire rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență înaltă și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate interfera cu comunicațiile radio.

IC: 21386-OBL3A (baza)

IC: 21386-OSS3A (senzorul)

Acest echipament îndeplinește partea 15 din normele FCC și este în conformitate cu RSS fără licență din Canada, fără excepții pentru inovare, știință și dezvoltare economică. Exploatarea echipamentului este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Compania Owlet Baby Care declară că șoseta inteligentă Smart Sock de la the Owlet este în conformitate cu Directiva 2014/53/ UE.

Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2.402-2.480 MHz (putere de ieșire 63 mW)

Bazele Bluetooth

2.412-2.462 MHz (putere de ieșire 75 mW)

Rețeaua Wi-Fi a bazei

2.402-2.480 MHz (putere de ieșire 6,3 mW)

Senzorii Bluetooth



Compania Owlet s-a angajat să respecte cerințele Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Mai multe informații privind eliminarea corectă a produselor Owlet în cadrul Uniunii Europene și în Marea Britanie le găsiți pe site-ul nostru.

INTRARE: 100-240 V~0.2 A 50-60 Hz

IEȘIRE: 5 V, 1 A



800433

Îndeplinește cerințele standardelor UL 62368-1  
și CAN/CSA-C22.2  
nr. 62368-1

Brevete americane nr. 9,693,730 și 10,449,837.  
Alte brevete în derulare.






# Descriere succintă a șosetei inteligente Smart Sock

Șoseta inteligentă Smart Sock™ 3 de la Owlet monitorizează funcțiile vitale ale bebelușului dvs. cu ajutorul a doi senzori.




Mărimea 1

Mărimea 2

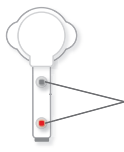

## Senzorii șosetei inteligente Smart Sock

Senzorul detectează ritmul cardiac și nivelul de oxigen al bebelușului.

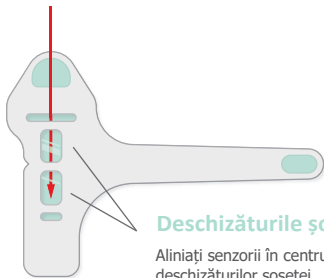

## Deschizăturile șosetei

Aliniați senzorii în centrul deschizăturilor șosetei.



## Se potrivește oricărui picioruș

Șoseta inteligentă Smart Sock de la Owlet poate fi pusă atât pe piciorușul drept, cât și pe cel stâng. Aveți grijă ca senzorul și conturul senzorului să se afle pe partea exterioară a piciorușului, după degetul mic, doar astfel este montată șoseta corect și poate obține datele necesare.




## Piciorușul drept

Șoseta inteligentă este bombată pe partea superioară a piciorului.

## Piciorușul stâng

Șoseta inteligentă este bombată la talpă.

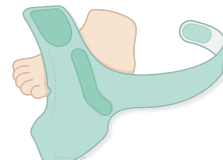

## Punerea șosetei inteligente Smart Sock

**Nu strângeți prea tare șoseta inteligentă.** Dacă cureaua trece dincolo de velcro, încercați o mărime de șosetă mai mică.

# Descriere succintă a bazei

E suficient să vă uitați la bază și veți afla dacă bebelușul dvs. se simte bine.

## Indicatorul șosetei inteligente Smart Sock

Lumina verde indică faptul că șoseta inteligentă Smart Sock este conectată la bază.

## Înregistrare

La configurarea produsului, aplicația vă solicită să apăsați o dată acest buton.

## Indicatorul rețelei Wi-Fi


Lumina verde indică faptul că baza este conectată la rețeaua Wi-Fi.

## Pornire/oprire

Dacă doriți să opriți baza, apăsați și eliberați-o. Baza emite un semnal sonor și lumina se stinge.

## Lumina de stare

Inelul luminos vă informează cu privire la starea bebelușului. Detaliile le găsiți în aplicație.

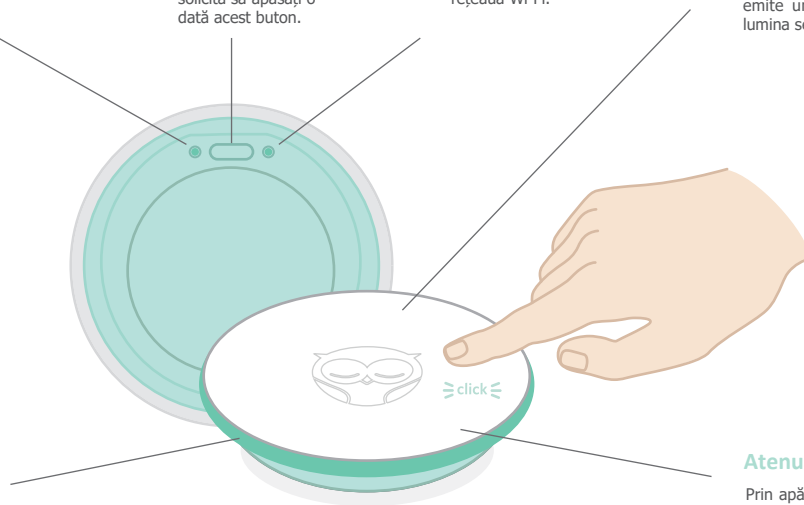


## Atenuarea luminii

Prin apăsarea și ținerea apăsată a bazei puteți comuta între modul luminii de zi și modul luminii atenuate de noapte.

# Culorile luminii bazei


Baza se poate aprinde în cinci moduri care indică diferite stări și emite alerte sonore. Pentru exemple, vă rugăm să accesați aplicația.

## Stare

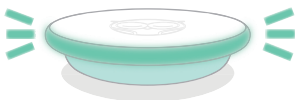


### Clipește în verde

Prima măsurare a ritmului cardiac și a nivelului de oxigen

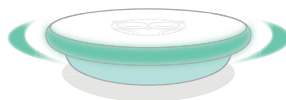

### Pulsează încet în verde


Atât ritmul cardiac, cât și nivelul de oxigen sunt normale.

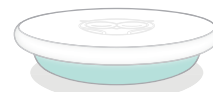

### Luminează în alb


Șoseta inteligentă Smart Sock este conectată și se încarcă.

## Alarmer

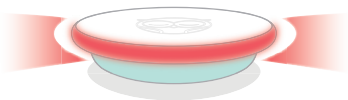


### Clipește în roșu

Ritmul cardiac sau nivelul de oxigen se află în afara intervalului specificat.

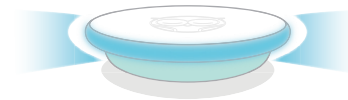

### Clipește în albastru

Șosetă inteligentă Smart Sock este deconectată de la bază.

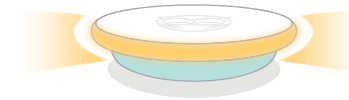

### Clipește în galben

Șoseta inteligentă Smart Sock a căzut de pe picioruș, este pusă necorespunzător sau este deplasată.


# Să începem!

1

Conectați componenta electronică a șosetei inteligente Smart Sock la baza cu ajutorul conectorului MicroUSB.


2

Conectați baza la priză. Șoseta inteligentă Smart Sock începe să se încarce.

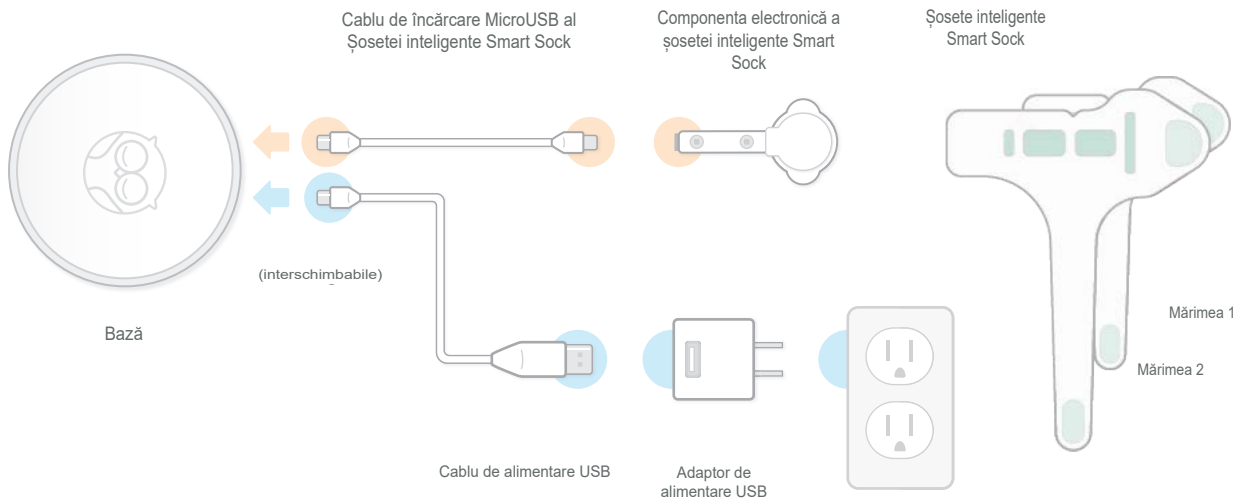

3

Descărcați aplicația Owlet și configurați șoseta inteligentă Smart Sock™ și baza.

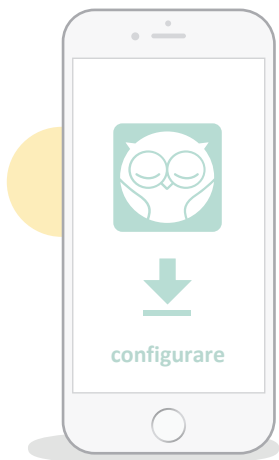

Aplicația Owlet

4

Cu ajutorul monitorului pentru bebeluși Owlet, care vă ajută să vă supravegheați bebelușul, puteți dormi din nou liniștit. Utilizați baza ca sistem principal de notificare și aplicația ca sistem secundar.



Bază

Șosetă inteligentă  
Smart Sock 3

Aplicația Owlet

# Informații privind garanția

## GARANȚIE LIMITATĂ

Compania Owlet garantează că șoseta inteligentă Smart Sock™ 3 de la Owlet nu va prezenta defecte de material și de fabricație în condiții normale de utilizare și service pe o perioadă de doi (2) ani de la data cumpărării, care este menționată pe bonul de cumpărare.

## Informații siguranță

**Șoseta inteligentă Smart Sock de la Owlet și aplicația Owlet sunt destinate să servească drept ajutoare pentru îngrijirea copilului și nu sunt destinate să înlocuiască sau să fie utilizate fără supravegherea unui adult responsabil.**

Șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet este concepută pentru copii sănătoși, prin urmare, pragurile de declanșare a unei alarme pe șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet nu sunt la fel de stricte ca cele ale monitorizării medicale.

- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet ca instrument de diagnosticare.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat utilizarea unui pulsometru de spital.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat utilizarea unui monitor de stop respirator de spital.
- Nu folosiți șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet ca o scuză pentru obiceiuri de somn nesigure.

## CITI ACEST MANUALUL DE UTILIZARE

În manualul de utilizare veți găsi multe sfaturi utile cu privire la modul corect de utilizare și întreținere a șosetei inteligente Smart Sock 3 de la Owlet. Pentru soluții la unele dintre aceste probleme, consultați secțiunea Soluționarea problemelor. Dacă citiți mai întâi sfaturile de soluționare a problemelor, este posibil să nu fie nevoie să ne contactați pentru ajutor. Informațiile complete despre modul de configurare și utilizare a produsului sunt disponibile pe site-ul [www.owletcare.ro](http://www.owletcare.ro).

## CITIȚI INFORMAȚIILE PRIVIND SIGURANȚA

Siguranța dumneavoastră și a altor persoane este foarte importantă pentru noi. În acest manual și în aplicația Owlet Baby Care găsiți multe instrucțiuni importante privind siguranța. Citiți întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță și respectați-le.



**Acest simbol din acest manual de utilizare atrage atenția asupra unor informații importante privind siguranța!**

Toate informațiile de siguranță vor fi urmate de un simbol de avertizare și de cuvântul „PERICOL”, „AVERTIZARE”, „ATENȚIE” sau „ATENȚIONARE”. Aceste cuvinte înseamnă:

**PERICOL** = Situație periculoasă iminentă care poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor.

**AVERTIZARE** = Situație potențial periculoasă care ar putea avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor și/sau deteriorarea bunurilor.

**ATENȚIE** = Situație periculoasă iminentă care poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor.

**ATENȚIONARE** = Situație periculoasă care ar putea duce la alte consecințe decât vătămări corporale, de exemplu, daune materiale.

## AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



**AVERTIZARE: Șoseta inteligentă Smart Sock 3 nu este un dispozitiv medical.** Șoseta Smart Sock 3 de la Owlet vă avertizează dacă ritmul cardiac sau nivelul de oxigen din sânge al copilului dvs. se află în afara unui interval prestabilit. Șoseta Smart Sock 3 este destinată nou-născuților până la o săptămână (18 luni, nu și copilul de peste o săptămână (18) luni. Șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet nu este un dispozitiv medical. Șoseta inteligentă Smart Sock 3:

- Nu este destinată diagnosticării, tratării, atenuării, monitorizării, tratamentului sau prevenirii oricărei boli sau vătămări.
- Nu afectează funcțiile sau structura organismului.
- Nu atinge scopurile sale principale prin acțiunea substanțelor chimice.
- Nu previne sindromul morții subite a sugarului (SMSS).

Scopul principal al acestui manual de utilizare este: Oferirea utilizatorului a instrucțiunilor de bază și a recomandărilor pentru instalarea și utilizarea corectă a șosetei inteligente Smart Sock 3 de la Owlet și explicarea funcționării, operării, măsurilor de siguranță, întreținerii și soluționării problemelor cu șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet. Este foarte important ca toate persoanele care urmează să utilizeze sau să seteze această șosetă inteligentă Smart Sock 3 să citească cu atenție manualul de utilizare pentru a înțelege cum să utilizeze corect șoseta inteligentă Smart Sock 3 de la Owlet și să respecte aceste instrucțiuni.

Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni, vă rugăm să ne contactați imediat prin e-mail: [owletcare.ro@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.ro@certus-mercatus.com)

## PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ



- PĂSTRĂȚI ÎN TOTDEALUNA BAZA LA O DISTANȚĂ DE CEL PUȚIN 1 METRU DE PĂTUȚUL DE COPIL, DEOARECE CABLUL POATE REPREZENTA UN PERICOL DE STRANGULARE.
- ȘOSETA INTELIGENTĂ SMART SOCK 3 DE LA OWLET ESTE DOAR UN ACCESORIU. NU ÎNLOCUIEȘTE SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.
- ÎN CAZUL COPILOR NĂSCUȚI PREMATUR, AL COPILOR CARE UTILIZEAZĂ OXIGEN SAU AL COPILOR CU DIZABILITĂȚI, CONSULȚĂȚI MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ȘOSETEI INTELIGENTE SMART SOCK 3 DE LA OWLET.
- ORI DE CÂTE ORI SUNĂ ALARMA, REACȚIONAȚI IMEDIAT.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE FCC



Modificările sau adaptările aduse acestui echipament care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru respectarea conformității pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a folosi acest echipament. Utilizați NUMAI adaptorul de alimentare furnizat. În cazul contrar se poate ajunge la anularea garanției noastre limitate. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B în conformitate cu partea 15 din normele FCC.

Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare într-o clădire rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență înaltă și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate interfera cu comunicațiile radio.



Acest echipament este în conformitate cu RSS fără licență din Canada, fără excepții pentru inovare, știință și dezvoltare economică. Exploatarea echipamentului este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

# Soluționarea problemelor

Setare implicită | Alarmer | Conectare

## Setare implicită

Problema	Cauze	Soluția
■ Nu văd rețeaua Wi-Fi a șosetei inteligente Smart Sock 3 în timpul configurării.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baza nu este pornită.</li><li>■ Baza este deja conectată la rețeaua Wi-Fi a șosetei inteligente Smart</li><li>■ Baza este în afara razei de acțiune.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Conectați baza la priză.</li><li>■ Verificați dacă indicatorul rețelei Wi-Fi de pe partea inferioară a bazei este aprins. Dacă da, săriți peste acest pas și continuați să vă creați un cont în aplicație.</li><li>■ Amplasați baza mai aproape de routerul Wi-Fi.</li></ul>
■ Nu văd rețeaua noastră Wi-Fi de acasă în aplicația Owlet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Routerul dvs. utilizează banda de frecvență de 5 GHz (produsul Owlet acceptă doar banda de 2,4 GHz).</li><li>■ Poate că aveți un router ascuns.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Asigurați-vă că dispozitivul IOS este conectat la rețeaua de 2,4 GHz (majoritatea routerelor de 5 GHz acceptă și o rețea de 2,4 GHz).</li><li>■ Îndrumări privind routerele ascunse sunt disponibile la <a href="http://owletcare.com/support">owletcare.com/support</a>.</li></ul>
■ Baza nu poate fi conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Parolă incorectă</li><li>■ Baza se află în afara razei de acțiune a routerului Wi-Fi.</li><li>■ Rețeaua Wi-Fi de acasă nu funcționează.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați parola pentru rețeaua dvs.</li><li>■ Înainte de configurare, amplasați baza mai aproape de router și după configurare duceți-o înapoi în camera copilului.</li><li>■ Încercați să reporniți telefonul și să vă reconectați la rețeaua Wi-Fi.</li><li>■ Resetați routerul Wi-Fi.</li></ul>
■ Baza luminează în alb după deconectarea șosetei inteligente Smart Sock.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Actualizare software în derulare.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Conectați din nou șoseta inteligentă Smart Sock la bază când actualizarea este completă.</li></ul>
■ Baza nu poate fi conectată cu contul meu Owlet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Baza și dispozitivul dvs. IOS nu sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.</li><li>■ Țineți apăsat butonul mic de înregistrare</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă baza și dispozitivul dvs. IOS sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.</li><li>■ Apăsați și eliberați (nu țineți apăsat) butonul mic de înregistrare din partea de jos a bazei și așteptați câteva secunde înainte de a încerca să împerecheați din nou contul dvs. Owlet.</li><li>■ Conectați dispozitivul dvs. IOS la aceeași rețea Wi-Fi de 2,4 GHz la care este conectată baza.</li></ul>

\*Aveți nevoie de suport tehnic?

Contactați-ne prin e-mail la adresa [owletcare.ro@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.ro@certus-mercatus.com)



## Alarmer

Problema	Cauze	Soluția
■ Baza clipește în albastru și emite semnal sonor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baza este în afara razei de acțiune a șosetei inteligente Smart Sock.</li> <li>■ Corpul părintelui sau al altei persoane care are grijă de bebeluș blochează conexiunea dintre șoseta inteligentă Smart Sock și bază. Acest lucru se întâmplă de obicei în timpul hrănirii, schimbării scuteceleor, mângâierii etc.</li> <li>■ Baterie slabă sau descărcată</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amplasați baza mai aproape de șoseta inteligentă de Smart Sock.</li> <li>■ Schimbați poziția bebelușului sau luați în considerare oprirea monitorului atunci când îl hrăniți, schimbați scutecele, îl îmbrățișați etc.</li> <li>■ Încărcați șoseta inteligentă Smart Sock.</li> </ul>
■ Baza clipește în roșu și emite semnal sonor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ritm cardiac scăzut sau ridicat</li> <li>■ Nivel scăzut de oxigen</li> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock nu se potrivește pe picioruș.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că conturul senzorului de pe partea exterioară a piciorului bebelușului se află la 1-2 mm după degetul mic.</li> <li>■ Asigurați-vă că șoseta inteligentă Smart Sock este alipită picioruș (dacă nu, șoseta inteligentă obține greu datele. De asemenea, poate fi declanșată o alarmă inutilă).</li> <li>■ Asigurați-vă că senzorii sunt potriviți în ferestrele șosetei din material textil.</li> <li>■ Gândiți-vă la posibilitatea de a folosi o altă mărime de șosetă din material textil.</li> </ul>
■ Baza clipește în cu galben și emite semnal sonor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Probleme cu obținerea datelor</li> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock nu este pusă corect.</li> <li>■ Lumina din cameră este prea puternică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că conturul senzorului de pe partea exterioară a piciorului bebelușului se află la 1-2 mm după degetul mic.</li> <li>■ Asigurați-vă că șoseta inteligentă Smart Sock este alipită picioruș (dacă nu, șoseta inteligentă obține greu datele. De asemenea, poate fi declanșată o alarmă inutilă).</li> <li>■ Asigurați-vă că senzorii sunt potriviți în ferestrele șosetei din material textil.</li> <li>■ Reduceți lumina în cameră.</li> </ul>

## Conectare

Problema	Cauze	Soluția
■ Baza nu este conectată la internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baza se află în afara razei de acțiune a routerului Wi-Fi.</li> <li>■ Rețeaua Wi-Fi de acasă nu funcționează.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amplasați baza și routerul Wi-Fi mai aproape una de cealaltă (amplificatoarele Wi-Fi sau alte routere nu vor rezolva problema).</li> <li>■ Resetați routerul Wi-Fi.</li> </ul>
■ Șoseta inteligentă Smart Sock nu se încarcă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock nu este conectată complet.</li> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock necesită resetare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lăsați șoseta inteligentă Smart Sock să se încarce până când se aude un clic și începe să clipească în verde.</li> <li>■ Opriți și reporniți din nou componenta electronică a șosetei inteligente Smart Sock.</li> </ul>
■ În locul valorilor privind ritmul cardiac și nivelul de oxigen sunt vizibile liniuțe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock încearcă să obțină informație fiabilă.</li> <li>■ Bebelușul își mișcă prea mult piciorușul.</li> <li>■ Șoseta inteligentă Smart Sock nu este pusă corect</li> <li>■ Șoseta din material textil nu se potrivește bine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că senzorii sunt potriviți în mijlocul ferestrelor șosetei din material textil.</li> <li>■ Nu puneți bebelușul în leagăn sau pe pernuțele vibratoare, deoarece acestea pot perturba buna funcționare a dispozitivului.</li> <li>■ Verificați dacă șoseta inteligentă Smart Sock este pusă corect.</li> <li>■ Verificați dacă ați folosit o mărime potrivită de șosetă din material textil.</li> </ul>

# Sugestii pentru un mediu de somn sănătos

Dorim să vă împărtășim câteva sugestii despre cum să asigurați un somn sănătos și sigur bebelușului dvs.

- Bebelușul ar trebui să fie singur în pătuț și întins pe spate. Dormitul pe o parte sau pe burtă nu este sigur pentru bebeluși.
- Cumpărați un pătuț pentru bebelușul dvs. care să respecte standardele actuale de siguranță. De asemenea, cumpărați o saltea solidă care să se potrivească bine la pătuț și acoperiți-o cu un cearșaf care să se potrivească bine.
- Nu așezați în pătuț niciun obiect moale, liber așezat sau pufos. Aceasta include perne, pături, plăpumi, căptușeli pentru pătuț, jucării de pluș, jucării și orice alte obiecte moi.
- În loc de o pătură clasică, folosiți o pătură pentru sugari care poate fi încheiată ca o haină, sau o pătură similară care va menține bebelușul la cald și în siguranță.
- Împărțiți o cameră cu bebelușul, dar nu și un pat. Bebelușul ar trebui să doarmă într-un pătuț separat, aproape de patul dvs. Astfel, va fi în siguranță și va fi mai ușor de hrănit. Dacă bebelușul ar dormi cu dvs., șoseta inteligentă Smart Sock nu ar funcționa corect. Corpul dvs. ar perturba semnalul wireless al șosetei.
- Aveți grijă să nu adormiți cu bebelușul în pat, pe canapea sau pe un fotoliu.
- Nu lăsați niciodată bebelușul să doarmă pe suprafețe moi, cum ar fi paturile pentru adulți sau copii, canapelele, fotolii, paturile cu apă, pernele, păturile, pieile de oaie și alte obiecte similare.
- Nu folosiți perne, pene de poziționare sau tampoane de fixare pentru a rezema, menține pe spate sau împiedica întoarcerea copilului.
- Aveți grijă ca bebelușul să nu se încălzească prea tare. Îmbrăcați-l într-o pijama ușoară și mențineți camera la o temperatură confortabilă care este plăcută pentru un adult îmbrăcat lejer.
- Gândiți-vă să-i oferiți copilului o suzetă în timpul somnului de după-amiază și de seară. Oferiți bebelușilor suzetă la vârsta de 3-4 săptămâni, când sunt obișnuiți cu alăptarea.
- Învățați aceste principii de somn în siguranță pe toți cei care au grijă de bebelușul dvs.!



## Declarație de Conformitate Owlet

**Producător:** Owlet Baby Care  
**2500 Executive PKWY**  
**Lehi, Utah 84043**  
**Tel.: 844.334.5330**

**Produs:** Owlet Smart Sock 3  
**Nr. model:** OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock Generația a 3-a

**Descrierea produsului:** Owlet Smart Sock Generația a 3-a are două componente – stația bază (OBL) și șoseta senzor (OSS). Șoseta senzor utilizează un senzor FPG (fotoplețismogramă) pentru a detecta pulsul și nivelul de oxigen al copilului când este purtată pe picior. Dispozitivul este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-Ion. Acesta transmite datele privind pulsul și oxigenul către stația bază prin Bluetooth Low Energy (BLE). Utilizează un circuit integrat Nordic nRF52840 care suportă modulația standard BLE și tehnici de comunicare. Senzorul utilizează o antenă metalizată pliată 3D internă în înveliș de plastic.

**Numele reprezentantului:** Obelis S.A.  
**Sediul reprezentantului:** Boulevard Général Wahis 53, B-1030  
Bruxelles, BELGIA  
Tel.: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03  
E-mail: mail@obelis.net  
**Reprezentant:** DI Gideon ELKAYAM

Subsemnatul, declar prin prezenta, în numele Owlet Baby Care din Lehi, Utah, că produsul susmenționat, căruia îi corespunde această declarație, este responsabilitatea exclusivă a Owlet Baby Care și este în conformitate cu prevederile următoarelor directive: Directiva Consiliului 2014/53/UE (16 aprilie 2014) –

Echipamente radio

- Directiva Consiliului 2014/35/UE (26 februarie 2014) – Joasă tensiune
- Directiva Consiliului 2011/65/UE (08 iunie 2011) – Restricții substanțe periculoase
- Directiva Consiliului 2014/30/UE (26 februarie 2014) – Compatibilitate electromagnetică
- Directiva Consiliului 2001/95/UE (03 decembrie 2001) – Siguranța generală a produselor
- Directiva Consiliului 2012/19/UE (04 iulie 2012) – Deșeurile de echipamente electrice și electronice

Dosarul tehnic prevăzut de această Directivă este păstrat la sediul social al Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Дата на издаване: 8/12/2021

*Tammy Lavery*

Tammy Lavery  
Director, tehnologie, calitate și afaceri juridice



Tel.: (004) 021.314.19.61; Mobil: (004) 0745.03.39.39  
e-mail: office@eurolingua.ro; www.eurolingua.ro

Subsemnata, Elena-Stefania CICIH, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și spaniolă în temeiul Autorizației nr. 1772, eliberate de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate în limba română. Nr. de înregistrare: 10844/20.06.2022.



Subscrisa, **CERTUS MERCATUS RO S.R.L.**, cu sediul în București, Strada Cezar Bolliac nr.8, etajul 1, apartament 2, Sector 3, înregistrată sub nr. J40/7168/2013 la Registrul Comerțului, CUI 31751199, email [info@cm-group.ro](mailto:info@cm-group.ro), telefon +40738.125.131, în calitate de importator și garantor pentru produsul Owlet Smart Sock 3 și Owlet Smart Sock Plus, declară în mod expres faptul că consumatorul are dreptul la măsurile corective în caz de neconformitate a bunurilor. Măsurile corective nu implică un cost pentru consumator și nu sunt afectate de garanția comercială.

Pentru a beneficia de garanția comercială oferită puteți contacta vânzătorul sau direct societatea noastră, în calitate de importator și garantor, la numărul de telefon și adresa de email indicate mai sus. În cazul în care veți adresa solicitarea direct societății noastre va trebui să atașați și o copie a facturii de achiziție a produsului.

Garanția comercială oferită de societatea noastră este valabilă timp de 2 ani începând cu data achiziției și este aplicabilă tuturor componentelor, șosete, senzor, bază, cablu, adaptor. Garanția comercială acoperă, în condițiile utilizării normale a produsului, toate neconformitățile rezultate ca urmare a folosirii unor materiale necorespunzătoare, probleme de producție și existența unui model eronat al produsului.

Vom înlocui produsul neconform cu unul nou, fără niciun cost pentru consumator, în termen de 15 zile de la data la care vom primi o solicitare

pentru garanția comercială. Consumatorul va trebui să ne expedieze produsul neconform pentru a putea verifica neconformitățile reclamate. Produsul neconform va fi însoțit și de factura de achiziție. Cheltuielile aferente expedierii produsului neconform către subscrisa și livrării produsului nou nu vor fi suportate de către consumator.

După primirea produsului reclamat ca fiind neconform și a facturii de achiziție vom verifica seria produsului pentru a confirma că acesta a fost comercializat de subscrisa. Garanția comercială nu va fi acordată pentru produsele ce nu au fost comercializate de societatea noastră.

În cazul în care vor exista întârzieri în expedierea de către consumator a produsului neconform către societatea noastră, nu putem garanta înlocuirea acestuia în termenul de 15 zile calculat de la data înregistrării reclamației. Restituirea prețului produsului neconform se poate solicita de către consumator doar de la vânzătorul produsului dacă nu ne vom îndeplini obligația de înlocuire a acestuia în termenul de 15 zile menționat mai sus.

Garanția comercială nu acoperă următoarele defecțiuni sau neconformități ale produsului cauzate de:

1. **transportul necorespunzător;**
2. **neglijența consumatorului în utilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile de instalare și utilizare**

3. **puse la dispoziție, incluzând folosirea unei surse de electricitate cu voltaj necorespunzător;**
3. **întreținerea necorespunzătoare;**
4. **reparația sau înlocuirea produsului de persoane/societăți neautorizate de către Certus Mercatus Ro S.R.L.;**
5. **folosirea produsului în alte scopuri decât cele menționate în instrucțiunile de instalare și utilizare;**
6. **setările smartphone-ului, specificațiile tehnice și funcționarea necorespunzătoare ce împiedică sau previn conexiunea wi-fi cu produsul.**

Garanția comercială nu acoperă accesoriile, consumabilele și părțile casabile.